

25 février 2019

AmnioTest™

Séance de formation



Objectifs

- Compléter cette séance de formation
- Comprendre la procédure
- Compléter le quiz
- Compléter le quiz annuellement

Les normes sur les analyses de biologie délocalisées (ADBBD)

Exigences d'agrément Canada:

- Une séance de formation, un quiz et un examen annuel sont requis pour chaque professionnel de la santé effectuant des ADBBD
- L'hôpital doit surveiller de près toute ADBBD effectué au chevet qui pourrait mener à un changement dans les soins d'un patient

Écouvillon au nitrazine AmnioTest™

- L'AmnioTest est un dépistage à base de PH qui aide à déceler une rupture des membranes amniotiques chez les femmes enceintes. Il est utilisé uniquement par du personnel médical qualifié .
- Un écouvillon imprégné de colorant jaune de nitrazine est mis en contact avec la partie postérieure du vagin. L'écouvillon absorbe le fluide et développe une couleur associée au PH du fluide absorbé (entre pH 5,0 et 7,5)

Écouvillon au nitrazine AmnioTest™

- Assurez-vous que la date d'expiration n'a pas été atteinte. La date d'expiration est indiquée sur l'emballage de l'écouvillon. **NE PAS utiliser si expiré.**


Procédure

1. Retirer l'écouvillon de son emballage. (Garder le bout de l'écouvillon sec en évitant tout contact avec des liquides)



Procédure

2. Écartez les lèvres pour introduire doucement l'écouvillon dans le vagin.
3. Assurez-vous que le bout de l'écouvillon entre en contact avec les tissus de la fosse postérieure du vagin et le col de l'utérus

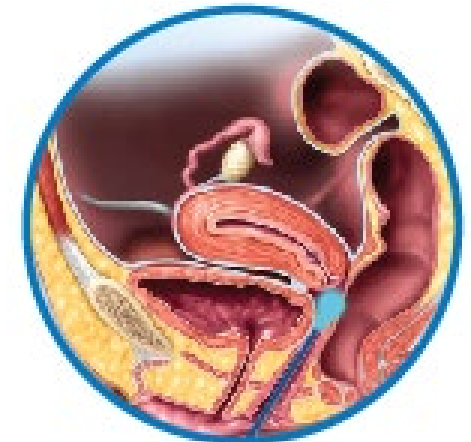

Ne pas utiliser sur serviette sanitaire


Procédure

4. Laisser le bout en contact avec le tissu vaginal postérieur pendant **15 secondes**



Procédure

5. Retirer soigneusement l'écouvillon et examiner immédiatement la couleur avec la carte d'Amniotest

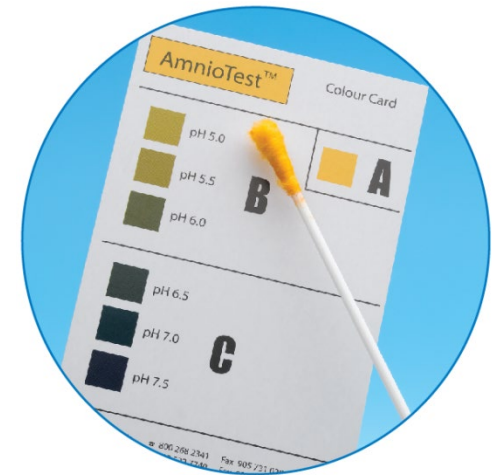

Interprétation des résultats

6. Déterminer si le pH prédictif est positif (rupture possible de la membrane) ou négatif (intact)

Groupe	Couleur	Approximative. valeur du pH	Indication Correspondant à :
A	Jaune	Sans objet (s/o)	Ecouvillon frais
B	Jaune/ Doré	5.0	Membrane amniotique intacte
	Jaune / Vert olive	5.5	
	Vert olive	6.0	
C	Vert foncé	6.5	Possibilité de rupture de la membrane
	Bleu foncé / Vert	7.0	
	Bleu marine	7.5 ou plus élevée	

Interprétation des résultats

- L'interprétation des résultats peut être affectée si l'écouvillon entre en contact avec:
 - du sang
 - Sperme
 - infections du vagin
 - antibiotiques



Documentation

- Sur la fiche d'évaluation obstétricale OUA/Triage, indiquez le nom de la personne qui effectue le test, numéro de lot et résultat (+ ou -)

<input type="checkbox"/>	Nitrazine:	+	/	-	Lot # _____	Nom: _____
<input type="checkbox"/>	Arborisation cervicale:	+	/	-		

Référence

Code du produit PL.901

Mode d'emploi approuvé par Santé Canada:

Récupéré le 4 janvier 2017 de: www.Pro-Lab.com

QUIZ

- Répondre aux cinq questions suivantes
- Vous devez obtenir 80% pour réussir
- Si vous ne réussissez pas – Veuillez contacter votre éducateur clinique pour plus de l'aide



Question 1

Q: Avant d'utiliser un écouvillon, quelle information importante doit être vérifiée au préalable?

- A. La couleur de l'emballage
- B. La date d'expiration
- C. Le logo du manufacturier
- D. Le numéro de téléphone de la société

Question 2

Q: Pendant combien de temps l'écouvillon doit-il rester en contact avec le tissu vaginal supérieur?

- A. 5 secondes
- B. 10 secondes
- C. 15 secondes
- D. 30 secondes

Question 3

Q: Qu'est-ce qui peut affecter l'interprétation du résultat?

- A. Sang
- B. Sperme
- C. Vaginose bactérienne
- D. Toutes les réponses sont bonnes

Question 4

Q: L'écouvillon affiche une couleur bleu foncé / bleu marine après utilisation. Qu'est-ce que cela signifie?

- A. Membrane possiblement rompue
- B. Membrane intacte
- C. L'écouvillon est mauvais. Le test doit être répété.
- D. Aucune de ces réponses.

Question 5

Q: Quand le dossier d'évaluation obstétrique est terminé, quels renseignements doivent être inclus?

- A. Votre nom, résultat, temps
- B. Votre nom, numéro de lot, heure
- C. Votre nom, date, heure
- D. Votre nom, numéro de lot, résultat

Félicitations!

Vous avez complété le quiz!

